



Hersteller- Geräteeinweisung

Lifepak CR-2

Geräte- Frontseite

1. Bereitschaftsanzeige



2. Verriegelung

Geräte- Rückseite




3. USB- Anschluss

4. Batteriefach

5. Warnsymbol

Bedienelemente – geöffnetes Gerät

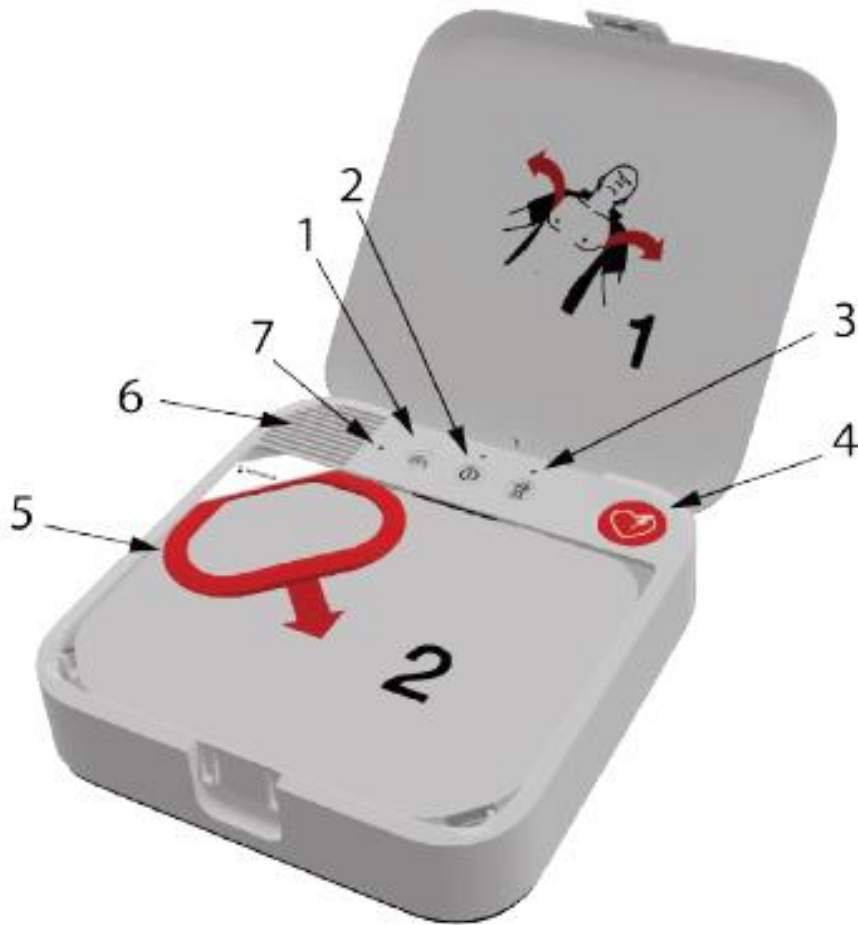


1. Taste **SPRACHE**
2. Taste **EIN/AUS**
3. Taste **KINDER-MODUS**
4. Taste/Anzeige **SCHOCK**
5. Roter Handgriff
6. Lautsprecher
7. Geräuschsensor

Bedienelemente



- Elektroden zur Entnahme
- Piktogramm auf den Elektroden zur Positionierung auf dem Brustkorb des Betroffenen

Inhalt des Ambu[®] Resuce-Pack

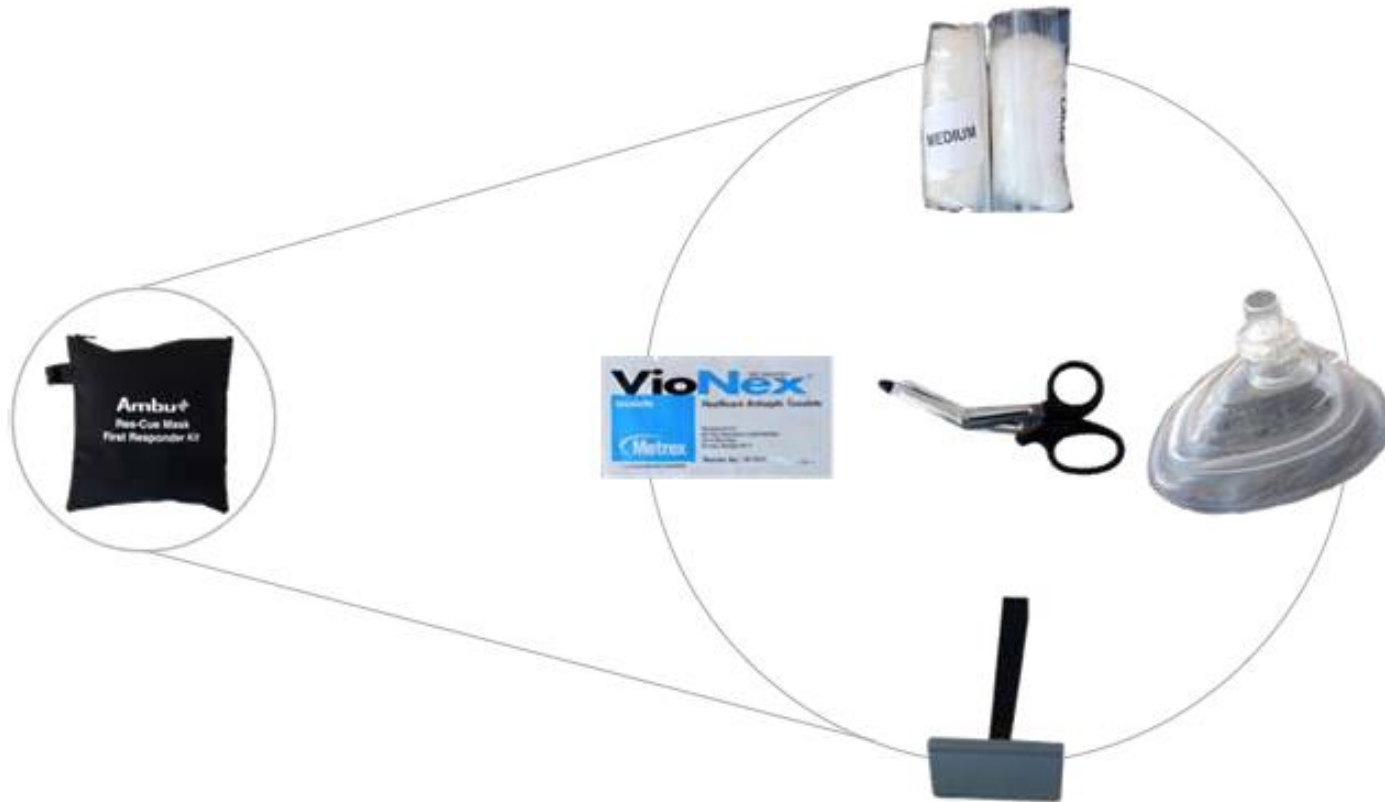

Verwendung des Defibrillators



Betroffene Person ist
nicht ansprechbar
- **Bewusstlos** -



Betroffene Person hat
keine normale Atmung
- **Atemstillstand** -


Sofortiger Beginn der Wiederbelebensmaßnahme!!

Notruf absetzen, AED holen lassen

Einsatz des Defibrillators



**... den folgenden
Anweisungen des
Gerätes folgen**

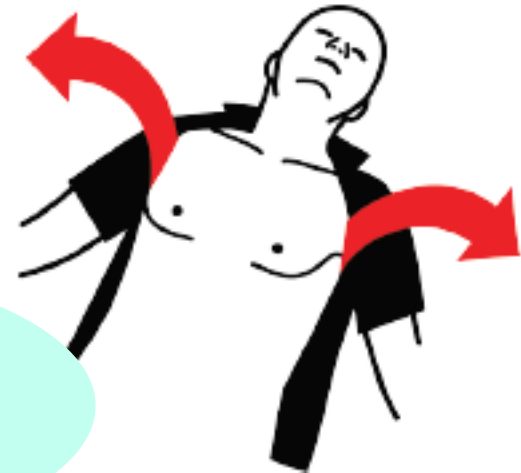

Öffnen der Abdeckung –
Gerät schaltet sich
automatisch ein

Oberkörper vollständig
freimachen

Einsatz des Defibrillators



ggf. Sprachauswahl
über die Taste **Sprache**



ggf. Auswahl
des **Kindermodus**

Einsatz des Defibrillators




Elektroden-Abdeckung
mit **rotem Handgriff**
entfernen



Elektroden entnehmen und
am Patienten befestigen

Elektrodenplatzierung

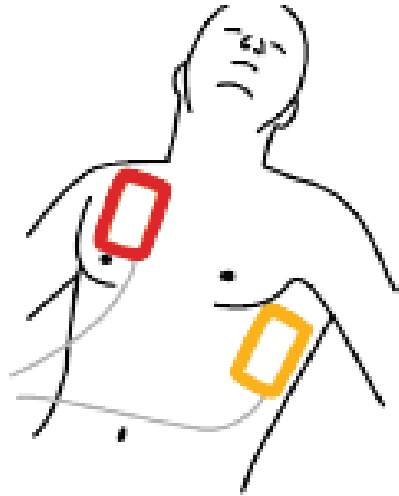


... bei übergewichtigen Patienten

Elektroden - wenn möglich - auf einer ebenen Fläche des Brustkorbs anbringen. Hautfalten ggf. auseinander ziehen und Elektroden gut andrücken

... bei schlanken Patienten

Den Konturen der Rippen folgen und Elektroden gut andrücken

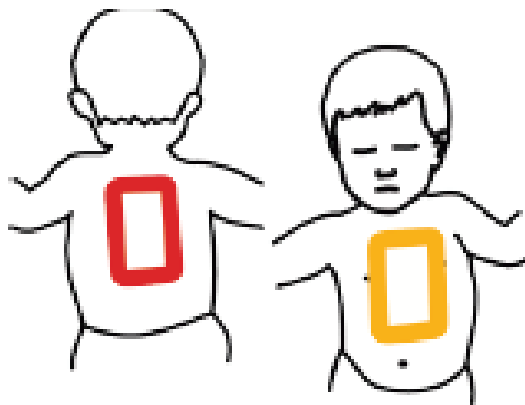

Hinweis: Elektroden fest auf den entkleideten Brustkorb aufdrücken, um Lufteinschlüsse zu vermeiden

Anbringen der Elektroden



- Klebebereich der Elektroden
 - trocken wischen
 - Mögliche Behaarung rasieren
- Außerhalb eines Schrittmacher kleben
- Elektrodenabstand mit mind. 2,5 cm

Verfahrensweise nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes

Nach Eintreffen des Rettungsdienstes

- Verlaufsschilderung/Übergabe

Möglichkeit der Weiterverwendung der Elektroden

- Prüfung, ob Rettungsdienst-Defibrillator für QUIK-COMBO Elektroden ausgelegt ist
- Elektrodenkabel gerade aus dem Defibrillator ziehen
- Stecker des Elektrodenpakets aus dem Defibrillator ziehen
- Drücken der Taste EIN/AUS für mind. 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten

Maßnahmen nach der Verwendung des Defibrillators

- Reinigung des Defibrillators
- Austausch der Elektrodenablage
- Ggf. Austausch der Batterie

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft

- **Austausch der Elektroden** nach einem Einsatz oder nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (4 Jahre)
 - **Austausch der Batterie** nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (4 Jahre) oder einer Fehlermeldung am Gerät
 - **Automatischer Selbsttest** des Defibrillators
 - Täglich
 - Wöchentlich
 - Monatlich
 - Nach dem Einschalten
 - Automatische Fehlermeldungen nach dem Selbsttest (WLAN)
 - Fehlersignalisierung durch erloschene Bereitschafts-LED und Signalton
-

Lifenet Bereitschafts- Benachrichtigungen (WLAN)


- Geräte- Statusmeldung**
 - 1x monatlich
- Elektrodenablage ersetzen**
 - 30 u. 60 Tage vor Ablaufdatum
- Batterie ersetzen**
 - 30 u. 60 Tage vor Ablaufdatum
- Technischer Fehler nach dem Selbsttest**
- Verbindungsaufbau zum WLAN-Netz fehlgeschlagen**



Überprüfung des Bereitschaftsstatus ohne WLAN



Deckel öffnen –
warten bis Sprachansage
beginnt.

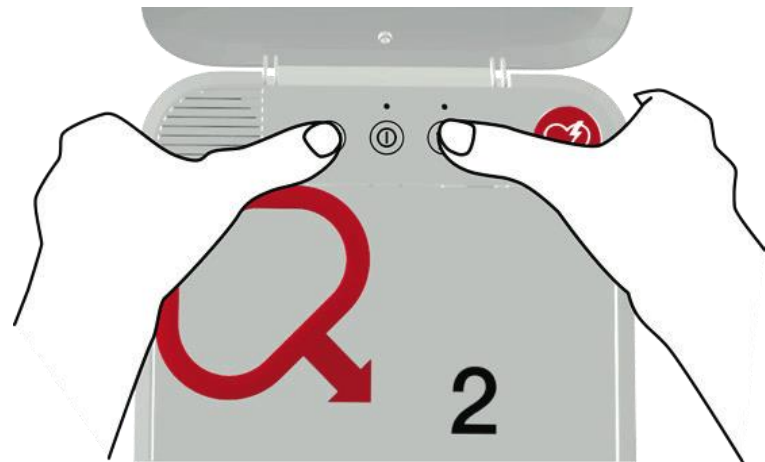

Taste **SPRACHE** und **KINDER-MODUS**
gemeinsam betätigen (innerhalb von 10 Sek.)
bis Sprachansage zum Gerätezustand folgt.

Überprüfung des Bereitschaftsstatus ohne WLAN

➤ Folgende Sprachansage wird ausgegeben:

GERÄT EINSATZBEREIT


oder

GERÄT NICHT EINSATZBEREIT

und folgende Geräteanweisung zu dem Fehlerfall

- **Elektrodenablage wechseln**
- **Batterie ersetzen**
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Wartungspersonal**

Austausch der Elektrodenablage

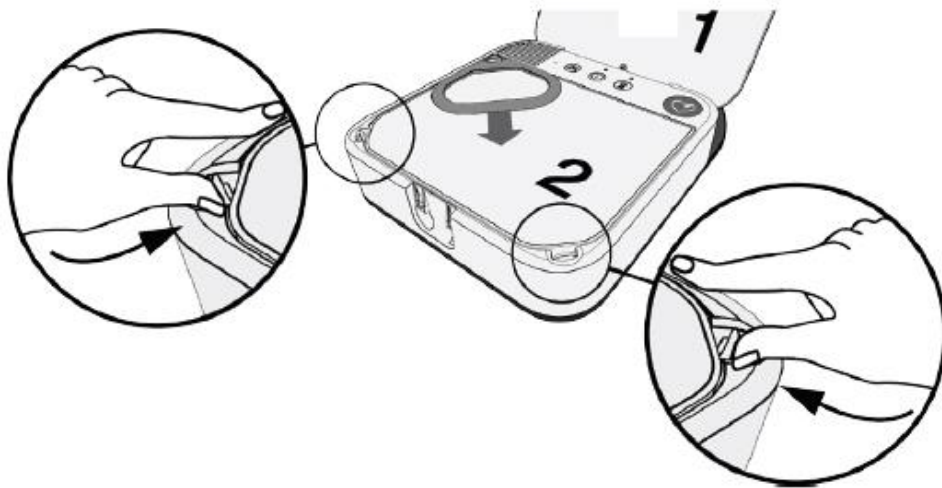


Clips an den vorderen Ecken eindrücken und Elektrodenablage anheben.




Elektrodenablage nach oben ziehen und aus dem Defibrillator herausnehmen

Austausch der Elektrodenablage

- Installieren der neuen Elektrodenablage

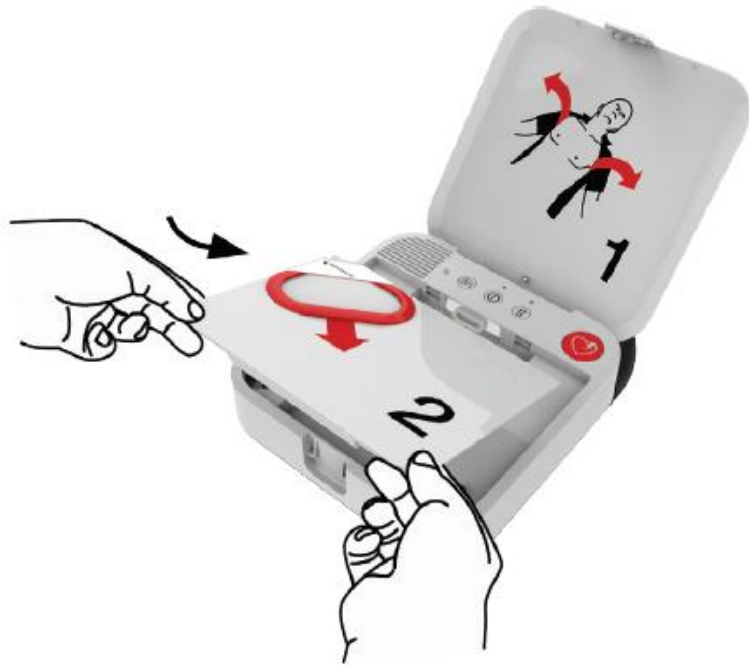

Einsetzen der
Elektrodenablage

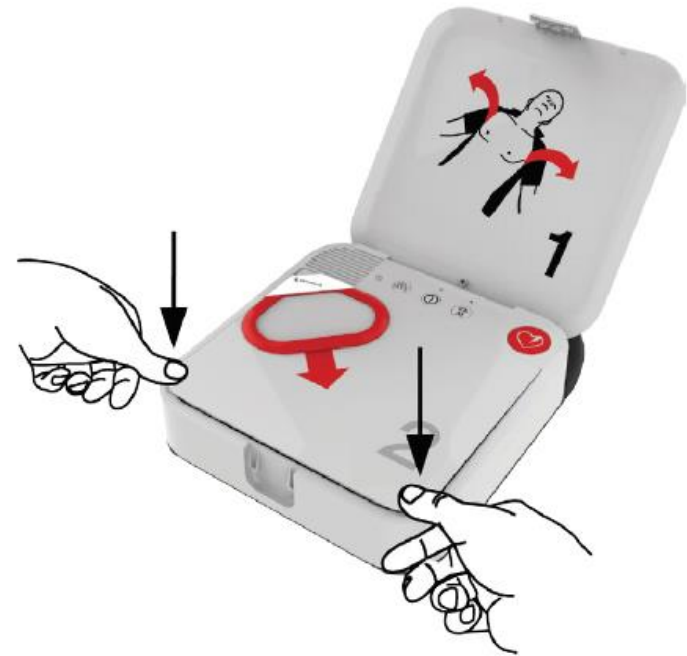

Auf die vorderen Ecken der
Elektrodenablage drücken,
bis Sie einrastet.

stryker[®]

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**
